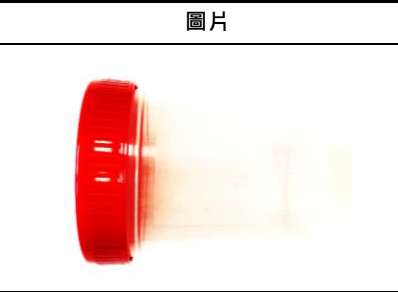
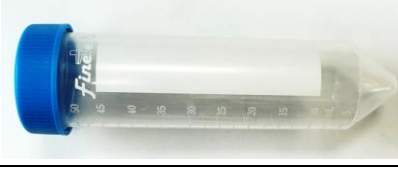
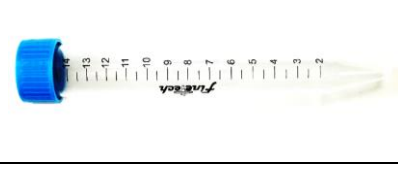
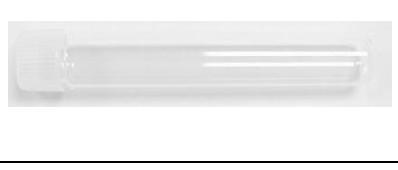

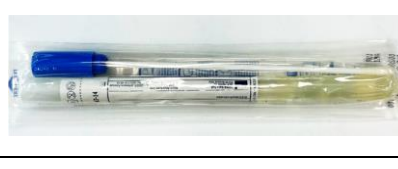









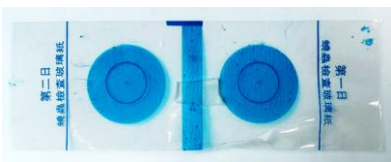



項次	容器名稱(內容物)	圖片	適用範圍
1	淡藍頭管		血液凝固學檢驗PT、APTT、D-Dimer、Fibrinogen可共用1管，委外項目應單獨抽再抽1管血
2	黃頭管(SSTR Gel及凝固活化劑)		生化檢驗、血清免疫檢驗
3	(淡)綠頭管(Lithium Heparin)		生化檢驗、血清免疫檢驗、藥物濃度檢驗、荷爾蒙檢驗
4	(深)綠頭管(Sodium Heparin)		急診之生化檢驗、血清免疫檢驗、藥物濃度檢驗使用。亦使用於胸水、腹水、關節液之鏡檢檢驗。
5	紫頭管(K2EDTA)		CBC、HbA1c、血庫備血、血型檢驗、ACTH、FK-506、ESR、Sirolimus、Cyclosporin A、G-6-PD、Homocysteine、Hb Electrophoresis 備註：ACTH、Homocysteine請冰浴送檢
6	灰頭管(Sodium Fluoride/K3EDTA)		Glucose、Lactate
7	小兒用綠頭管(Lithium Heparin)		新生兒生化檢驗、血清免疫檢驗
8	小兒用紫頭管(K2EDTA)		新生兒血液學檢驗
9	紅蓋S-Y尿液管		尿常規分析、尿沉渣顯微鏡檢查及尿液懷孕試驗，建議採檢量 10~12 mL請用尿杯收集中段尿再倒入管中，蓋子請蓋緊避免外漏。
10	尿液生化管		尿液生化檢驗

項次	容器名稱(內容物)	圖片	適用範圍
11	深藍頭紅色滾邊管		無添加物空白管·用於AL, Zn, Cr, Cu檢驗·不可開蓋採集·請用真空採血或直接用針頭注入採血管內·最大採血量6 mL。
12	深藍頭紫色滾邊管		含抗凝劑K2EDTA 10.8 mg·用於血中鉛(Lead, Pb)·不可開蓋採集·請用真空採血或直接用針頭注入採血管內·最大採檢量6 mL。
13	酸洗管(尿液重金屬)		微量金屬Aluminum、urine Arsenic尿總砷及無機砷、urine Cd尿鎘、Urine Ni尿鎳、Urine Hg尿汞、Cr尿鉻、Urine Mn尿錳專用管
14	QuantiFERON專用管		採檢次序為灰管、綠管、黃管、紫管·以真空採血收集4管·約2-3秒至標示黑色刻度處約1mL容量·採檢後立即施力搖動上下混合試管10次·靜置室溫·檢體不可冷藏或冷凍。 採檢後到檢體進入實驗室·放置室溫最長時間·不得超過16小時。 送檢單位如有37°C溫箱、離心機·請先完全混合檢體管十次·培養37°C·20(16-24)小時後·完成離心後原管送檢·標示已經培養已經離心·則可於冷藏或室溫運送檢體。
15	血液培養瓶 (Soybean casein digest broth plus antibiotic-binding resins)		抗生素治療後之血液細菌培養檢體收集。
16	血液培養瓶 (Soybean casein digest broth)		用於尚未使用抗生素治療病人之血液細菌培養檢體收集。 血液細菌培養之檢體收集。
17	小兒血液培養瓶 (Soybean casein digest broth plus antibiotic-binding resins)		小孩專用血液細菌培養之檢體收集。

項次	容器名稱(內容物)	圖片	適用範圍
18	寬口無菌杯		尿液培養、精液分析、微生物抗原快速鑑定、濫用藥物篩檢、或應無菌收集的檢體。
19	50ml大尖底管		無菌容器，常用於痰液培養TB培養檢體收集
20	15mL無菌離心管		適用於各種體液檢驗、支氣管沖洗液、Tip或Tube culture、病理檢體
21	白蓋無菌玻璃管		適用於各種體液檢驗、Tip或Tube culture
22	Blood gas標準採血空針(Heparin)		用於血液氣體 抽完後輕緩混合均勻，需冰浴盡速送檢
23	嗜氧傳送管		藍色頭蓋，使用於一般培養檢體傳送 適用於rectal swab culture、Pus、Wound、生殖道檢體、眼分泌物、ENT Swab、Throat Swab 等檢體之嗜氧細菌培養
24	厭氧傳送管		黑色頭蓋用於厭氧培養檢體傳送
25	咽喉採檢棒		RSV、Adenovirus抗原、流感抗原檢驗
26	鼻咽採檢棒		流感抗原快篩
27	病毒採檢套組(分生檢驗用)		微生物分生檢驗用

項次	容器名稱(內容物)	圖片	適用範圍
28	病毒培養棒與培養液傳送管		病毒培養專用
29	S-Y定量糞便瓶		化學法糞便潛血檢查、糞便白血球(膿細胞)檢查、阿米巴檢查、糞便中性脂肪或脂肪酸檢查。
30	iFOBT 專用採檢棒		糞便淺血免疫定量專用採檢棒
31	張氏糞便濃縮集卵瓶		限使用於MIF濃縮法寄生蟲、痢疾阿米巴檢查
32	無菌容器		痰液常規檢查、或培養檢體收集。
33	糞便培養傳送管(附植絨拭子)		糞便培養(一般糞便培養、Campylobacter culture)
34	痰盒		痰液常規檢查、或培養檢體收集。
35	專用蟯蟲採檢膠紙		專用蟯蟲採檢膠紙。 採檢注意事項：早上起床後，未上廁所或未清洗肛門前，黏面於肛門口周圍用力壓貼5-6下。
36	毛細管		玻璃毛細管，添加Lithium heparin有抑制凝血功能。使用於小兒總膽紅素收集用